



Guía de uso para el set de infusión **Neria™ Guard**

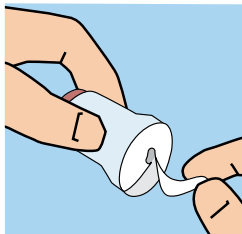


1.- Retire suavemente el papel protector del apósito adhesivo.

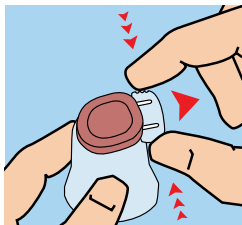


2.- Retire el protector del dispositivo de inserción apretando ligeramente los laterales del protector mientras lo retira para que salga recto.




Atención, a partir de este momento la aguja queda desbloqueada

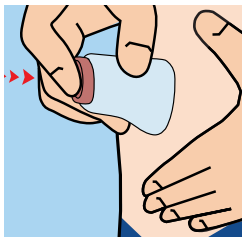


3.- Coloque el dispositivo de inserción en la piel y pulse el botón rojo de activación para insertar el equipo de infusión.

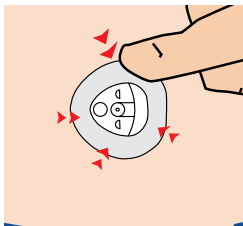

4.- Presione el apósito adhesivo sobre la piel.

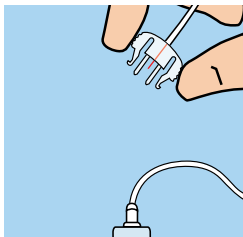

5.- Conecte el tubo a la bomba de infusión y cebe el tubo conforme a las instrucciones suministradas por el fabricante de la bomba.

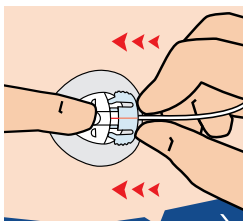

6.- Coloque un dedo en el revestimiento de la cánula mientras presiona el conector para que entre recto, hasta que se oiga un "clic".

Consulta el vídeo
de la aplicación
AQUÍ



Por favor, tenga en cuenta que esta guía solamente ilustra alguno de los pasos a seguir en la aplicación de los sets de infusión Neria™ Guard, y que en ningún caso sustituye la lectura de las instrucciones de uso completas que figuran en el prospecto incorporado en la caja del producto.

NGUA.20
AP-020570-ES

neria™ es una marca de Unomedical a/s
© 2018 ConvaTec Inc.



ConvaTec