


Neria™Multi

- Infusionssets

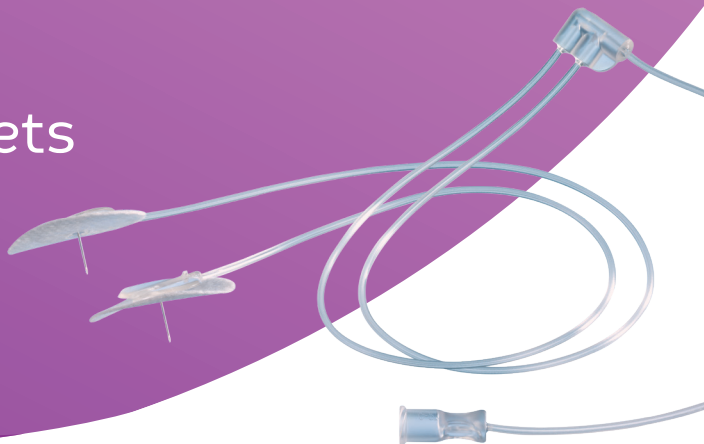

Neria™Multi ist eine Palette an Infusionssets mit mehreren Edelstahl-Punktionsnadeln für die subkutane Infusion von Immunglobulinen (IgG) zur Behandlung einer primären Immundefizienz. Die Infusionssets Neria™Multi sind mit mehreren Punktionsnadeln zur Verabreichung großer Volumina von Immunglobulinen über einen kurzen Zeitraum (1-2 Stunden) ausgestattet.

Produktspezifikationen

Konfigurationen	Sets mit einer, zwei, drei oder vier Nadeln
Kanüle	Edelstahl
Punktionswinkel	90 Grad (im rechten Winkel)
Dekonnektion	Nein
Gauge Größe:	G27
Haftung	Integriertes, hautfreundliches ¹ Polyestervlies; Acrykleber
Klemme	Ja


	Zweifachset	Dreifachset	Vierfachset
Nadellängen	8 und 10 mm	8, 10 und 12 mm	8, 10 und 12 mm
Schlauchlängen	90 cm	90 cm	90 cm
Füllvolumen	~ 0.32 ml	~ 0.39 ml	~ 0.48 ml

Die Infusionssets Neria™ multi sind in Verpackungseinheiten zu je 10 Stück erhältlich.

Literatur: ¹Biologische Sicherheitstests, Oktober 2011, Daten liegen vor, Unomedical a/s.


Infusionssets Neria™ Multi

- Anwendung

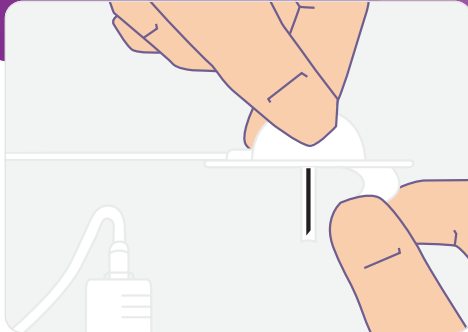


Schritt 1.

Befüllen Sie den Schlauch entsprechend den Angaben des Pumpenherstellers. Ziehen Sie das Papier von der Klebefläche ab.

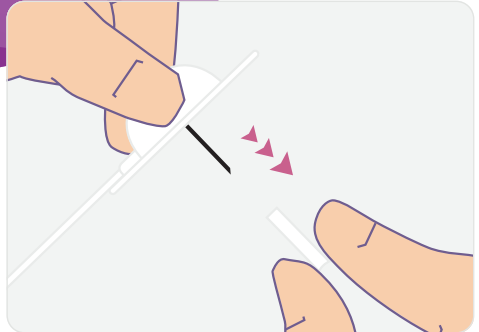

Schritt 2.


Die Nadelschutzkappe zum Entfernen vorsichtig drehen und ziehen.

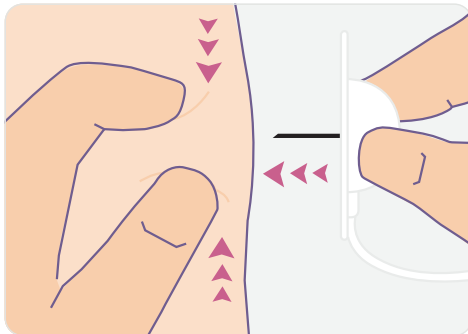

Schritt 3.

Bilden Sie mit einer Hand eine Hautfalte und führen Sie das Infusionsset Neria™ Multi in einem Winkel von 90 Grad (im rechten Winkel) ein.

Wiederholen Sie die Schritte 1-4 für jede einzelne Punktionsstelle.

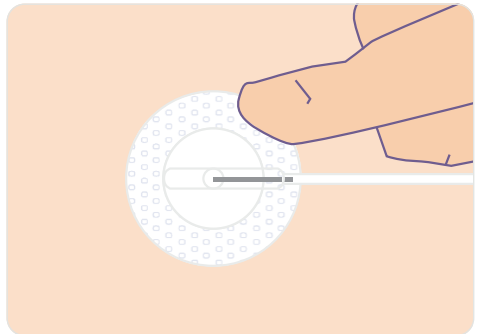

Schritt 4.

Die Klebefläche des Infusionssets Neria™ Multi für eine sichere Fixierung auf die Haut drücken. Überprüfen Sie die Punktionsstelle regelmäßig.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Bitte beachten Sie, dass in dieser Anleitung nur einige der Schritte zur Anwendung der Infusionssets Neria™ Multi beschrieben sind. Vor der Anwendung ist stets die dem Produkt beiliegende Gebrauchsanweisung zu lesen.

AP-68006-DEU-DEU-v1 (v1.0) · Stand 08/2024

© 2024 Convatec

Neria is a trademark of Unomedical A/S. The Convatec name, Hug icon and strapline are trademarks of Convatec.